

NOVA T380 Livmoderinlägg av koppar för antikonception

ANVISNINGAR FÖR INSÄTTNING


Insättningen skall utföras av utbildad sjukvårdspersonal.

Före insättningen

Läs anvisningarna noggrant före insättningen. Kontrollera att förpackningen med NOVA T380 är oskadad innan den öppnas.

1. Upprätthåll strikt aseptik under insättningen.
2. Gör cervix synlig med ett spekulum och rengör den med antiseptisk lösning. Fatta tag om främre delen av portio med en klotång. Genom att försiktigt dra i klotången minskas vinkeln mellan cervix och livmoderkaviteten, så att det går lättare att föra in en livmodersond. Håll kvar tången i läge under hela insättningen av NOVA T380 så att en lätt dragning av cervix kan bibehållas.
3. För in sonden genom cervix och in i livmoderkaviteten tills den når fundus. När riktning och längd hos cervix och livmoderkaviteten har bestämts, gör i ordning NOVA T380 för insättning.
4. Gör insättningen enligt steg 1–6.


Insättning

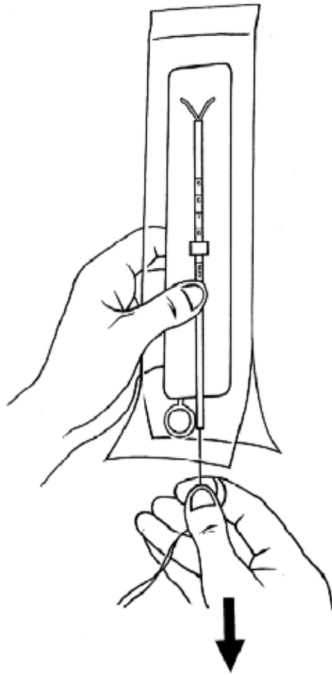

Steg 1

När livmodern har sonderats, öppna förpackningen till hälften.

Ta tag i båda trådarna, tidigast fem minuter innan insättningen, och dra försiktigt in inlägget i insättningsröret så att knopparna längst ut på de horisontella armarna täcker rörets öppning. Knopparna ska inte dras in i röret. Observera att trådarna kan gå av om de dras för hårt.

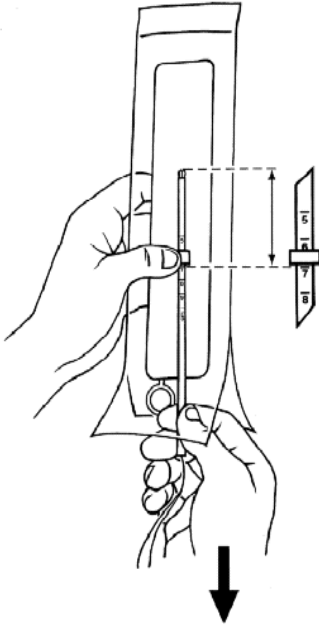


Steg 2

Håll fast den gula ringen med ena handen och dra insättningsröret så att ringens nedre kant anger det erhållna sondmåttet.

Håll trådarna sträckta i röret med ena handen och för in kolven i röret så att kolven inte trycker upp trådarna mot inlägget.

Före insättningen kan insättningsröret böjas efter livmoderns läge. Böjningen ska göras med inlägget kvar i den sterila förpackningen efter det att kolven har förts in i röret.

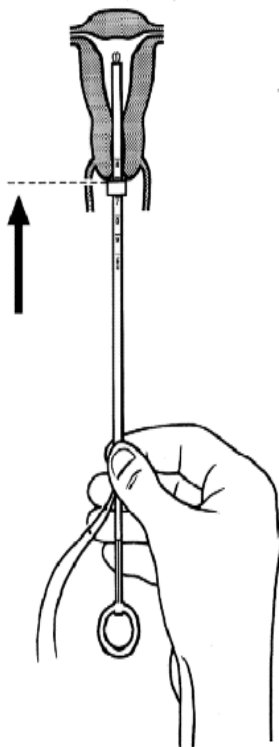


Steg 3

Kontrollera att ringen visar i vilken riktning de horisontella armarna kommer att öppnas i livmodern.


Ta ut det laddade insättningsröret ur förpackningen.

För röret genom cervix in i livmodern tills ringen berör livmodermunnen.

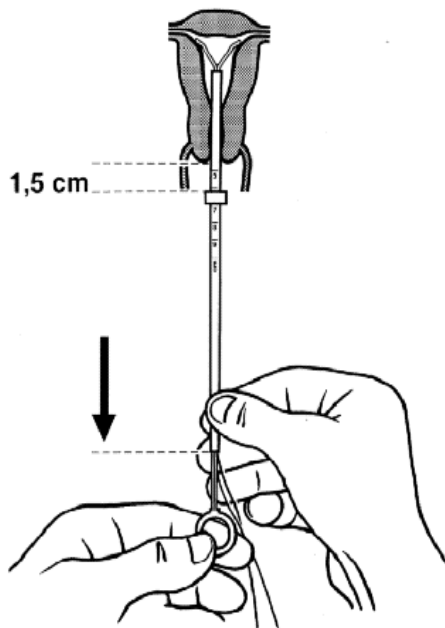


Steg 4

Observera den räfflade delen av kolven. Håll kolven stilla och frigör inläggets horisontella armar genom att dra röret nedåt tills det når den räfflade delen. Observera att avståndet mellan ringen och livmodermunnen nu är ca 1,5 cm.

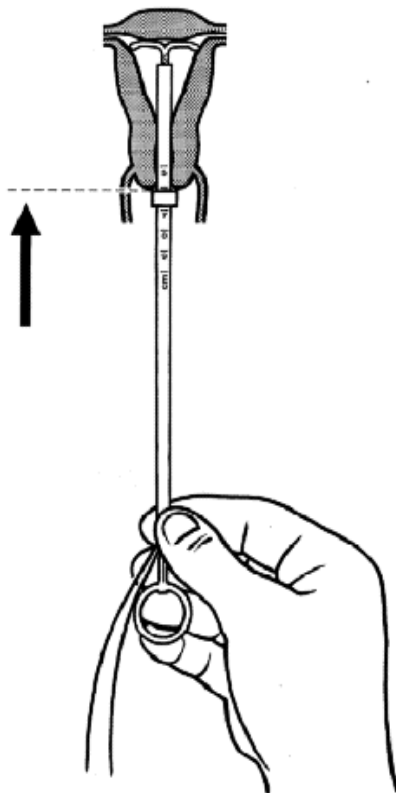

Steg 5

Håll samman röret och kolven och för dem försiktigt uppåt tills ringen åter berör livmodermunnen.

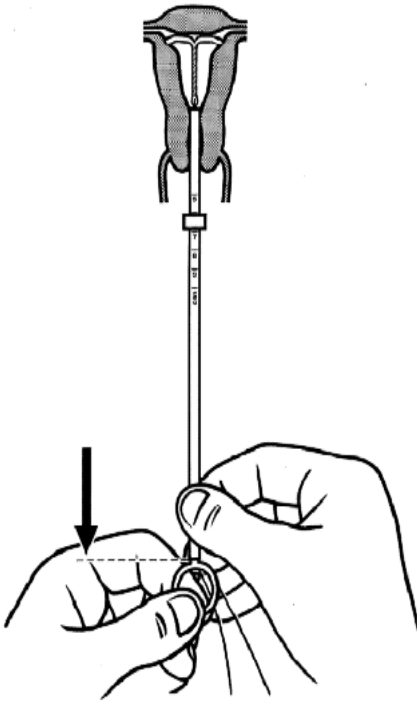


Steg 6

Håll kolven stilla och frigör inlägget helt från insättningsröret genom att dra röret nedåt till kolvens ring.

För att undvika att dra inlägget från sitt läge i fundus, håll insättningsröret stilla och tag bort kolven. Först därefter tas röret bort.

Klipp av trådarna så att 2–3 cm är synliga utanför cervix.

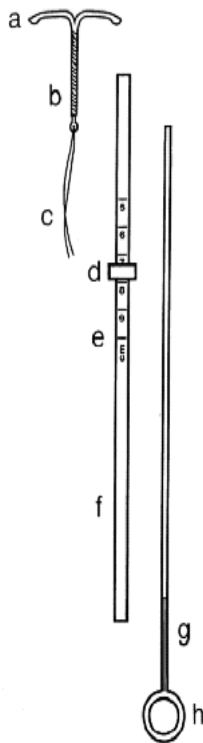

- a. Horisontella armar
- b. Vertikal arm med Cu/Ag-tråd
- c. Utdragningstrådar
- d. Ring
- e. Centimeterskala
- f. Insättningsrör
- g. Råfflad del
- h. Kolv

Viktigt!

Vid misstanke om att inlägget inte är i rätt läge ska det tas ut och ett nytt sterilt inlägg sätts in. Ett uttaget inlägg får inte återinsättas.

Gå kortfattat igenom innehållet i "Patientinformation" med patienten. Uppmana patienten att läsa informationen noggrant. Fyll i insättningsuppgifterna på patientinformationen.

Tillverkare

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Tyskland

Distributör

Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna

CE 0344**Datum för översyn av denna information**

2019-03-08